

Lampa bactericida UVC 36W, 2 tuburi 18W, sterilizare 36 mp, montare perete

Manual de instructiuni

Lampa UVC cu montare pe perete este recomandată pentru incinte și spații mici (microbiologie, măsuțe instrumentar, hotel, spitale, clinici etc) cu o suprafata de sterilizare de pana la 36 mp.

- Prevăzută cu 2 tub generator de radiație UV-C (lungime de undă 253,7nm);
- Durata de viață a tuburilor UV până la reducerea radiației UV cu 15%: minim 9000 ore;
- Tip montare: prindere pe perete;
- Alimentare: 220V / 50Hz, cablu de alimentare cu intrerupator on/off;
- Termen de garanție 24 luni.

TIMPUL DE STERILIZARE: pozitionati lampa in centrul camerei si urmati instructiunile:

Suprafata	Timp sterilizare
• 0-10 mp	15 min
• 10-20 mp	30 min
• 20-40 mp	60 min
• 40 – 60 mp	90 min
• 60-90 mp	120 min

APLICATII:

- Dezinfecția aerului și suprafețelor din încăperi cu încărcătura microbiană mare prin intermediul radiației UV (spitale, laboratoare de analize medicale, laboratoare de microbiologie, săli de operație, cabinete medicale individuale CMI, cabinete stomatologice, săli așteptare, producția de medicamente, produse naturiste etc).

MICROORGANISME DISTRUSE: bacterii, viruși, spori de mucegai, drojdii, alge, protozoare etc.

MOD DE INSTALARE:

1. Îndepărtați corpul protector și tubul fluorescent.
2. Conectați cablurile electrice la blocul terminal pentru conexiuni.
3. În interiorul corpului veți găsi șuruburile corespunzătoare cu ajutorul cărora se realizează fixarea acestuia pe perete.
4. După montare puteți porni tensiunea de alimentare a instalației electrice.

ATENȚIE!!!

1. Înainte de a porni lampa asigurați-vă că în camera respectivă nu au rămas persoane, animale sau plante.
2. Lumina ultravioletă reflectată dintr-o oglindă de exemplu poate fi la fel de daunătoare pentru piele și ochi.
3. Nu lăsați aparatul nesupravegheat, la îndemana copiilor sau a persoanelor lipsite de discernământ (cel mai bine închideți cu cheia camera în care acesta funcționează).
4. Lumina ultravioletă UV-C directă este daunătoare pentru piele și mai ales pentru ochi, poate provoca arsuri grave.
5. Nu vă dezinfectați mainile cu această lampă, folosiți lumina ultravioletă UV-C doar pentru dezinfectia obiectelor. Pentru maini folosiți sapunul sau alte produse recomandate.
6. Nu priviți direct la lampa în timpul utilizării.
7. Lucruri precum tablouri, panze, fotografii și în general obiecte care pot fi deteriorate de lumina soarelui, nu sunt, de asemenea, recomandate să fie expuse la lumina directă a lampii UV-C.
8. Opriti lampa atunci când doriți să o curățați.
9. Dacă temperatura camerei este mai mică de 20 grade Celsius sau mai mare de 40 grade Celsius, timpul de sterilizare trebuie extins.
10. După ce s-a încheiat ciclul de sterilizarea al încăperii nu intrați imediat, incinta trebuie aerisita minim 15-30 minute.
11. Nu lăsați copii în preajma dispozitivului.



Acest simbol indica faptul că acest produs face obiectul unei colectări separate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie colectate separate și să nu fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie predate unui sistem de colectare, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE. Echipamentele electrice și electronice sunt periculoase pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, ca urmare a prezenței în compoziția lor a unor substanțe periculoase. Pentru informații suplimentare privind predarea și colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale și central de colectare autorizate în acest sens.