

Lampa bactericida UVC 75W, dezinfectare ozon, suprafata sterilizare 60mp, telecomanda, corp metalic, fixare perete

Manual de instructiuni

Lampa UVC cu montare pe perete este recomandată pentru incinte și spații (microbiologie, măsuțe instrumentar, hotel, spitale, clinici etc) cu o suprafata de sterilizare de 10 -60 mp.

- Prevăzută cu 1 tub generator de radiație UV-C (lungime de undă 253,7nm);
- Durata de viață a tuburilor UV până la reducerea radiației UV cu 15%: minim 9000 ore;
- Tip montare: prindere pe perete;
- Alimentare: 220V / 50Hz, cablu de alimentare;
- Actionare din telecomanda, cu timer 15/30/60 minute;
- Termen de garanție 24 luni.

TIMPUL DE STERILIZARE: pozitionati lampa in centrul camerei si urmati instructiunile:

| Suprafata | Timp sterilizare |
|--------------|------------------|
| • 0-10 mp | 15 min |
| • 10-20 mp | 30 min |
| • 20-40 mp | 60 min |
| • 40 – 60 mp | 90 min |
| • 60-90 mp | 120 min |

APLICATII:

- Dezinfecția aerului și suprafețelor din încăperi cu încărcătura microbiană mare prin intermediul radiației UV (spitale, laboratoare de analize medicale, laboratoare de microbiologie, săli de operație, cabinete medicale individuale CMI, cabinete stomatologice, săli așteptare, producția de medicamente, produse naturiste etc).

MICROORGANISME DISTRUSE: bacterii, viruși, spori de mucegai, drozii, alge, protozoare etc.

MOD DE INSTALARE:

1. Montati lampa pe perete si apoi conectați-o la priza.
2. Apăsăți tasta „ON” de pe telecomandă și lampa se va aprinde automat și va începe să funcționeze.
3. Dacă este selectat modul de cronometrare, apăsați tasta „15 minute” sau tasta „30 minute” de pe telecomandă pentru a selecta timpul de dezinfectare iar modul de cronometrare va fi pornit.
4. În timpul dezinfecției, oamenii și animalele trebuie să părăsească inciperea pentru a evita disconfortul sau ranirea.
5. Aerisiti obligatoriu incinta minim 30 de minute dupa sterilizare.

ATENȚIE!!!

1. Inainte de a porni lampa asigurați-va ca in camera respectiva nu au ramas persoane, animale sau plante.
2. Lumina ultravioleta reflectata dintr-o oglinda de exemplu poate fi la fel de daunatoare pentru piele si ochi.
3. Nu lasati aparatul nesupravegheat, la indemana copiilor sau a persoanelor lipsite de discernamant (cel mai bine inchideti cu cheia camera in care acesta functioneaza).
4. Lumina ultravioleta UV-C directa este daunatoare pentru piele si mai ales pentru ochi, poate provoca arsuri grave.
5. Nu va dezinfecati mainile cu aceasta lampa, folositi lumina ultravioleta UV-C doar pentru dezinfecția obiectelor. Pentru maini folositi sapunul sau alte produse recomandate.
6. Nu priviti direct la lampa in timpul utilizării.
7. Lucruri precum tablouri, panze, fotografiile si in general obiecte care pot fi deteriorate de lumina soarelui, nu sunt, de asemenea, recomandate sa fie expuse la lumina directa a lampii UV-C.
8. Oprite lampa atunci cand doriti sa o curatati.
9. Daca temperatura camerei este mai mica de 20 grade Celsius sau mai mare de 40 grade Celsius, timpul de sterilizare trebuie extins.
10. Dupa ce s-a incheiat ciclul de sterilizarea al incaperii nu intrati imediat, incinta trebuie aerisita minim 15-30 minute.
11. Nu lasati copiii in preajma dispozitivului.



Acest simbol indica faptul că acest produs face obiectul unei colectări separate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie colectate separate și să nu fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie predate unui sistem de colectare, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE. Echipamentele electrice și electronice sunt periculoase pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, ca urmare a prezenței în compoziția lor a unor substanțe periculoase. Pentru informații suplimentare privind predarea și colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale și central de colectare autorizate în acest sens.